

ALCOHOLIMETRO DIGITAL

PROFESIONAL AD-6000NS CON PANTALLA LED

CARACTERÍSTICAS:

Alta precisión y sensible: el alcoholímetro está equipado con un módulo de sensor de célula de combustible de alta calidad para una larga vida útil y resultados precisos, no utilice el analizador de aliento hasta que haya pasado 20 minutos desde la última bebida, espere al menos 3 minutos para comenzar la siguiente prueba después de la última prueba.

Operación con un solo botón: el AD-6000NS es extremadamente fácil de usar, simplemente inserta las 2 pilas AA (no incluidas), enciende tu alcoholímetro y empieza a probar, es así de fácil, tus resultados de BAC se muestran 10 segundos después en una visualización LCD brillante y fácil de leer.

Ahorro de energía: puede establecer el apagado automático después de 15 segundos para ahorrar energía, cada vez que instalas una batería, puedes probar más de 200 veces.

Tamaño pequeño y portátil: el AD-6000NS es nuestro alcoholímetro profesional más pequeño, por lo que es más fácil de llevar a cualquier lugar.



NOTA DE USO

1. Inserte dos baterías AA de 1,5V y una boquilla
2. Presione el botón de encendido durante 1-2 segundos para iniciar el dispositivo. Espere 15 segundos a que se caliente (No sople en el modo calentamiento)
3. Cuando aparezca el icono "BLO" en la pantalla, respire profundamente y sople a un ritmo constante durante 5 segundos.
4. Los resultados se mostrarán en la pantalla LED en 5 segundos.

Si el resultado está entre 0,02% y 0,05% BAC (0,2 g/L ~ 0,05 g/L), la luz parpadeará y el timbre sonará una alarma audible. Si el resultado supera 0,05% BAC (0,5 g/L), la luz roja parpadeará con una señal acústica continua.

